



Via Michelangelo Buonarroti, 52/B - 20093 Cologno M.se (Mi)

## **VASCHE DI SVILUPPO TIPO A MANUALE A-VS-22**



Sviluppo manuale di pellicole Rx fino al formato cm 30 X 40

COMPOSTO DA:

- 2 scomparti fissi da 2.5 lt per sviluppo e fissaggio
- 1 scomparto fisso da 15 lt per lavaggio intermedio e finale

**DIMENSIONI :**

Cm 22 x 38 x 53

**PESO:** 11 Kg

## **MANUALE ISTRUZIONE E INSTALLAZIONE**




REV.01/2015

## 1.0 INTRODUZIONE

La struttura della presente vasca è realizzata interamente in PVC anti acido per garantirVi qualità, affidabilità e garanzia nel tempo. E' divisa in tre scomparti indipendenti fra loro: uno di sviluppo (1) uno di fissaggio (2) entrambi con capacità di lt.2,5 e uno per il lavaggio intermedio e finale (3) con capacità di lt.15.

Ogni scomparto è dotato di un suo rubinetto (4) di scarico dei liquidi.

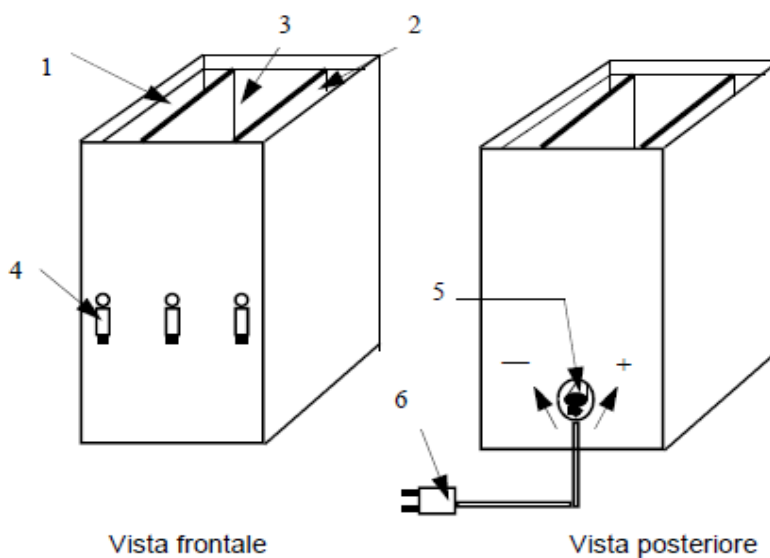

### Legenda:

- 1- Scomparto di sviluppo
- 2- Scomparto di fissaggio
- 3- Scomparto di lavaggio
- 4- Rubinetti di scarico

### DIMENSIONI:

cm 22x38x53

PESO: Kg 11

## 2.0 INSTALLAZIONE

Prima di procedere all'installazione controllare che il materiale consegnato sia completo ed integro nelle sue parti.

### • BASE D'APPOGGIO

Per evitare rovesciamenti non voluti, verificare sempre che la vasca sia in posizione sicura, ed appoggiata su di un piano idoneo.

### **3.0 ATTIVAZIONE**

Inserire la spina della vasca nella presa elettrica, alzare la leva dell'interruttore generale presente nel quadro in posizione "ON" e l'apparecchio è funzionante.

### **5.0 MANUTENZIONE**

La vasca modello "TIPO A" non ha bisogno di manutenzione particolare.

Si consiglia una pulizia periodica della vasca utilizzando una spugna non abrasiva.

### **7.0 GARANZIA**

La riparazione o la sostituzione delle parti difettose costituisce piena soddisfazione degli oneri di garanzia.

La garanzia non comprende nessun danno indiretto e sono esclusi materiali di normale consumo.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio o scorretto e dall'inosservanza delle informazioni contenute in questo manuale.

**ATTENZIONE: QUESTO MANUALE DEV'ESSERE CONSERVATO PER TUTTA LA VITA DELLA VASCA E DEVE SEMPRE ESSERE A DISPOSIZIONE DELL'OPERATORE E DEL MANUTENTORE.**

**La Società CABLAS s.r.l. declina ogni responsabilità in caso di omissioni o manomissioni dell'apparecchio.**