

# **CABLAS** s.r.l.

Via Michelangelo Buonarroti, 52/B - 20093 Cologno M.se (Mi)

## **VASCHE DI SVILUPPO MANUALE TERMOREGOLATE**

DELTA 1



## **MANUALE ISTRUZIONE E INSTALLAZIONE**

**CE**

REV.01/2015

## 1.0 INTRODUZIONE


La struttura della presente vasca è realizzata interamente in PVC anti acido per garantirVi qualità, affidabilità e garanzia nel tempo.

La vasca ha una zona sviluppo con resistenze corazzate e termoregolate.

La vasca è completa di una bacinella estraibile dalla capacità di lt. 10 per lo sviluppo.

Una bacinella estraibile dalla capacità di lt.10 per il fissaggio.

La zona di lavaggio intermedio e finale ha una capacità di lt.80.

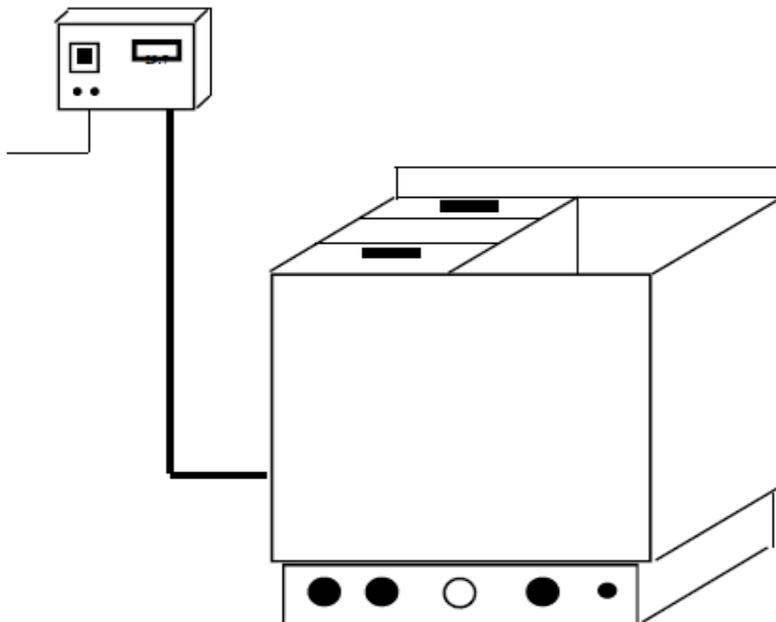

**N.B.: FISSARE IL QUADRO ELETTRICO AD UNA ALTEZZA ACCESSIBILE AGLI OPERATORI**

**ATTENZIONE: PRIMA DI INSERIRE LA SPINA NELLA PRESA ELETTRICA, ASSICURARSI CHE NELLA VASCA CI SIA DELL'ACQUA ALTRIMENTI SI POTREBBE DANNEGGIARE LA RESISTENZA ELETTRICA.**

## 2.0 INSTALLAZIONE

Prima di procedere all'installazione controllare che il materiale consegnato sia completo ed integro nelle sue parti.

- **BASE D'APPOGGIO**

Per evitare rovesciamenti non voluti, verificare che la vasca sia in piano

- **COLLEGAMENTO ELETTRICO**

La vasca è fornita con cavo d'alimentazione con spina.

L'utente deve predisporre una presa elettrica nelle vicinanze dell'apparato con portata uguale o superiore a 6A con **TERRA**.

**ATTENZIONE: I CAVI DI COLLEGAMENTO DALLA VASCA AL QUADRO ELETTRICO NON DEVONO ESSERE ASSOLUTAMENTE ALLUNGATI O MANOMESSI.**

### **3.0 ATTIVAZIONE**

Inserire la spina della vasca nella presa elettrica, alzare la leva dell'interruttore generale presente nel quadro in posizione "ON" e l'apparecchio è funzionante.

### **4.0 REGOLAZIONE**

Tramite un termostato presente nell'apparecchiatura, voi potete regolare la temperatura del liquido al valore ottimale consigliato dal produttore stesso.

### **PROGRAMMAZIONE PARAMETRI**

SET: premendolo e rilasciandolo si ottiene la visualizzazione del valore impostato della temperatura.

Tenendo premuto il tasto SET e agendo con le frecce rosse e azzurre, si incrementa o si diminuisce il valore impostato.

dT: differenziale. Differenziale d'intervento. Per regolarlo premere l'apposito pulsante e agire sui tasti freccia per aumentare o diminuire il valore.

### **5.0 MANUTENZIONE**

La vasca tipo DELTA 1 termoregolata non ha bisogno di manutenzione particolare.

Si consiglia di scaricare completamente la vasca per evitare il depositarsi di calcare e altre incrostazioni sia sulla resistenza elettrica che su altre parti della vasca.

### **6.0 SOSTITUZIONE DELLE PARTI INTERNE**

Se il cavo d'alimentazione risulta danneggiato, esso dev'essere sostituito o dal costruttore o da un centro d'assistenza autorizzato

### **7.0 GARANZIA**

La riparazione o la sostituzione delle parti difettose costituisce piena soddisfazione degli oneri di garanzia.

La garanzia non comprende nessun danno indiretto e sono esclusi materiali di normale consumo.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio o scorretto e dall'inosservanza delle informazioni contenute in questo manuale.

**ATTENZIONE: QUESTO MANUALE DEV'ESSERE CONSERVATO PER TUTTA LA VITA DELLA VASCA DELTA 1 TERMOREGOLATA E DEVE SEMPRE ESSERE A DISPOSIZIONE DELL'OPERATORE E DEL MANUTENTORE.**

**La Società CABLAS s.r.l. declina ogni responsabilità in caso di omissioni o manomissioni dell'apparecchio.**



Via Michelangelo Buonarroti, 52/B  
20093 Cologno Monzese (MI)  
Tel. (02) 253.80.88 r.a. - Telefax (02) 27300644  
Sito Internet: www.cablas.com  
E-mail: cablas@cablas.com

**SCHEMATURE ANTIX - ACCESSORI PER RADIOLOGIA**

## **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE**

La sottoscritta "CABLAS S.r.l." con sede in  
Via Michelangelo Buonarroti 52/B  
20093 Cologno Monzese (MI)

DICHIARA  
Sotto la propria responsabilità, che il prodotto

**VASCHE DI SVILUPPO MANUALE TERMOREGOLATE**

Codici

A-VS-01	A-VS-03
---------	---------

La vasca Termoregolata è conforme alla Direttiva "BASSA TENSIONE 73/23/CEE" e alle leggi successive.

Inoltre costruita uniformemente alle norme armonizzate  
EN 60335-1 ed.1990  
EN 60335-2-73 ed 1997

Se installato e messo in funzione secondo le istruzioni contenute nella documentazione tecnica fornita col prodotto.

Cologno Monzese, anno 2013

**CABLAS S.R.L.**  
Via Michelangelo, 52/B  
20093 COLOGNO MONZESE (MI)  
S.r.l. Via Sormani 34 - COLOGNO M.SE  
Tel. R.A. 02 2538088 - Fax 02 27300644  
Cod. Fisc. e P. IVA 11903230156

